



**fittydent super**

## **ADEZIV PENTRU PROTEZA DENTARĂ**

Pentru proteze dentare superioare, inferioare și parțiale.



### **Indicații de utilizare:**

1. Spălați și uscați complet proteza dentară.
2. Aplicați adezivul pe proteza dentară în fâșii (așa cum este prezentat în pliantul intern cu Instrucțiunile de utilizare), asigurându-vă că nu este prea aproape de marginea protezei dentare.
3. Închideți etanș tubul imediat după utilizare
4. Introduceți proteza dentară în gură și mușcați cu fermitate. Pentru cele mai bune rezultate, așteptați 15 minute pentru a mânca.