



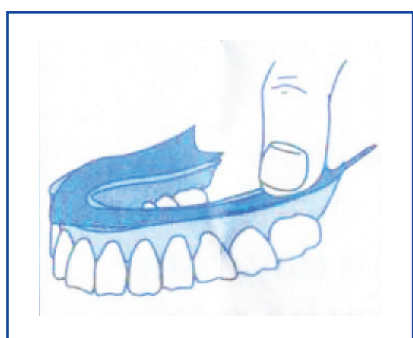

fittydent super

PERNIȚE ADEZIVE PENTRU PROTEZA DENTARĂ

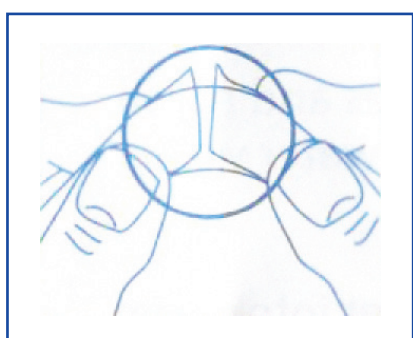

Indicații de utilizare:

1. Curățați și uscați complet proteza dentară inferioară înainte de a aplica fittydent Pernițe Adezive.
2. Îndepărtați folia de protecție de pe ambele părți ale perniței, înainte de utilizare. Pentru a îndepărta cu ușurință folia, îndoiiți puțin pernița.
3. Aplicați pernița pe proteza dentară inferioară și apăsați cu fermitate. Eliminați cu grijă bulele de aer.
4. Dacă este necesare, tăiați pernița cu o foarfecă, pentru a avea aceeași dimensiune cu proteza dentară. Pentru cele mai bune rezultate, așteptați 15 minute înainte de a mânca sau bea.

Sugestii:

- Pentru gingiile sensibile poate genera ocazional o senzație ușoară de gâdilare sau arsură.
- fittydent Pernițe Adezive nu este indicat a se utiliza împreună cu proteze dentare cu căptușeală moale.
- Consultați-vă regulat medicul stomatolog pentru a vă asigura că proteza dentară este ajustată corect.