



## fittydent super TABLETE DE CURĂȚARE

### Indicații de utilizare:



Scoateți proteza dentară și periați-o sub jetul de apă.



Puneți o tabletă într-un pahar cu apă caldă.



Lăsați proteza dentară sau aparatul dentar în soluția creată pentru cel puțin 5 minute.



Clătiți proteza dentară sau aparatul dentar sub jetul de apă. Uscați complet înainte de a aplica fittydent adeziv sau pernițe adezive.

#### Atenție!

Tabletele și soluția de curățare nu sunt pentru uz oral. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Conține persulfat: poate cauza alergii. În cazul contactului cu ochii, clătiți prudent cu apă pentru câteva minute, îndepărtați lentilele de contact, dacă acestea există și dacă sunt ușor de îndepărtat, continuați clătirea. În cazul înghițirii, sunați centrul de toxicologie sau doctorul, în cazul în care vă simțiți rău. Spalați cu grijă mâinile după contact. Citiți instrucțiunile înainte de folosire.