

GEBRUIKSAANWIJZING



Kies eerst de juiste maat. Zie daarvoor de binnenzijde van deze folder.

1. Klap de bovenste laag omhoog en trek StomaSafe via de benen aan met de opening voor het stomazakje naar beneden. 2. Haal het stomazakje door de opening en klap de bovenste laag naar beneden. 3. Schuif, indien gewenst, de ileo- of urinesluiting van het stomazakje in de uitsparing en klaar.

Kijk op WWW.STOMASAFE.NL voor de instructievideo.

StomaSafe Plus

“Geeft mij net dat beetje extra gevoel van zekerheid.”

EXTRA FIXATIE VAN HET STOMAZAKJE

StomaSafe is geen stoma steunbandage (breukband), maar een uiterst comfortabele oplossing om een stomazakje extra te fixeren op het onderlichaam. StomaSafe herstelt de lichaamscontouren, helpt huidirritatie van het stomazakje te voorkomen, absorbeert lichaamsvocht en werkt geluiddempend. Voor een hoge compressie om een parastomale hernia maximaal te ondersteunen verwijzen wij u naar de stomaverpleegkundige voor het aanmeten van een Corsinel stomagordel of bandage. StomaSafe wordt niet vanuit de basisverzekering vergoed.

VERKRIJGBAARHEID

Alle StomaSafe fixatiebandages zijn verkrijgbaar bij uw lokale Belgische apotheek of bandagist. Mochten deze verkooppunten StomaSafe nog niet kunnen leveren, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.



WWW.ALLWECARE.BE

Bel voor hulp of meer informatie tijdens kantooruren met onze klantenservice
+31 (0)24-6777800

Ruimte voor lokale leverancier.

**AllweCare**
Belgium

AllweCare Belgium B.V. T +31 (0) 24 - 6777800
Grote Markt 28, B-3200 Aarschot E office@allwecare.be

AllweCare® Belgium BV is de exclusieve Belgische distributeur voor de fabrikant van StomaSafe. Alle teksten en afbeeldingen vallen onder copyright en eventuele schrijf- of drukfouten voorbehouden. Deze medische hulpmiddelen zijn vrij of op voorschrift van een zorgprofessional via de apotheek of medisch speciaalzaak te verkrijgen. Lees voor gebruik de bijsluiter. Wij houden ons aan de MDR, AVG en GMH. Prijzen zijn actueel op 1 januari 2023 inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Corsinel®
Live as you like



StomaSafe Plus



- Geluiddempend
- Hoger draagcomfort
- Meer zekerheid
- Extra bescherming
- Voor man en vrouw



Fixatiebandage voor ondersteuning van het stomazakje.



StomaSafe Plus is verkrijgbaar in een neutrale witte uitvoering. De stof is niet doorschijnend en deze StomaSafe sluit optimaal aan bij wit ondergoed.

StomaSafe Plus WIT

Artikelnr.	maatvoering
STOMASAFEWSM	Small/Medium 80-110 cm
STOMASAFEWML	Medium/Large 105-125 cm
STOMASAFEWLXL	Large/Extra large 120-140 cm

Verkrijgbaar per stuk



Bij beige ondergoed of om aan te sluiten bij een lichte huidskleur (bijvoorbeeld voor een bezoek aan de sauna of het zwembad) is de StomaSafe Plus in een beige kleur de juiste keuze. Deze stof is minder vlekgevoelig dan wit.

StomaSafe Plus BEIGE

Artikelnr.	maatvoering
STOMASAFEBSM	Small/Medium 80-110 cm
STOMASAFEBML	Medium/Large 105-125 cm
STOMASAFEBLXL	Large/Extra large 120-140 cm

Verkrijgbaar per stuk

Wasvoorschrift

De StomaSafe is wasbaar op 40 graden Celsius bij voorkeur in een waszak. De bandage mag in de wasdroger maar kies daarbij de laagste stand (het wolprogramma). Niet strijken, niet bleken en niet chemisch reinigen.



StomaSafe is ook verkrijgbaar in een stijlvolle zwarte kleur wat uiteraard prima aansluit bij zwarte onderkleding. In deze zwarte uitvoering is StomaSafe het minst vlekgevoelig.

StomaSafe Plus ZWART

Artikelnr.	maatvoering
STOMASAFEZSM	Small/Medium 80-110 cm
STOMASAFEZML	Medium/Large 105-125 cm
STOMASAFEZLXL	Large/Extra large 120-140 cm

Verkrijgbaar per stuk

Waslabels



Maximaal wassen op 40° C. Latex vrij



Kies de juiste maat

Meet ter hoogte van het breedste gedeelte van de buik.

Let op: Meet de maat liggend.

Zelfs geschikt voor onder de douche, in bad, in de sauna of om mee te zwemmen!